

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2020 年 1 月 29 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500061
作業年月日	2020 年 1 月 29 日		作業時間： 2.5 Hr
顧客名	おおくにクリニック 様		TEL： 055-288-0092
所在地	山梨県甲府市大里町5125		ご担当 様
販売店	株式会社 匠ディカル		ご担当 中島 様
納入年月日	2019 年 1 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
異常履歴 なし	
不具合原因、作業内容	
保守点検作業実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ ハル数 730
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0303 / T12A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ありません。	

装置 情報	交換後運転回数： 89 更新（リット）実施・未実施	消毒（総運転回数）： 18 / 消毒（洗剤洗浄あり）： 14
	消毒+アル（総運転回数）： 72	/ 消毒+アル（洗剤洗浄あり）： 72
	リークチェック： 0	自己洗浄： 34
	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 1set
交換後 No. OWS-15E 11070714			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続ホース（チューブ側）	☐	水フィルター	☒ 1
140220-007			オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1	給水フィルター E-202	☒ 1
洗剤ボトル	☒	1	コントロールボード	☒ 1		☐
Ver. 0303						
お客様ご確認署名欄						
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。						
R2 年 1 月 29 日 下田 彩子 下田 印						

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
2020.1.29	2020.1.29
青木	青木

Ver. 1.0

Ver.1.0