

保守点検・修理 報告書

発行日：令和2年2月19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100617
作業年月日	令和2年 2月 19日		作業時間： 1 Hr
顧客名	木之瀬医院 様		TEL：055-273-2216
所在地	山梨県中央市布施2074		ご担当 様
販売店	株式会社平塚メディカル		ご担当 様
納入年月日	平成25年2月21日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張 引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
保守点検作業			
不具合原因、作業内容			
保守点検作業			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 439
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
特になし			

装置 情報	交換後運転回数： 12	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 459	殺菌/消毒+7L： 1393
	リークチェック： 2	自己洗浄： 1350	アルコール単独： 1	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	排水栓		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	オゾン水濃度計		☒	1
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	オゾン水濃度計用フィル		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	オゾンセンサー		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

令和2年2月19日

山梨県中央市布施2074

医療法人 木之瀬医院

ご署名 木之瀬 正 印

電話 055 責任技術者 22 作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

