

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300624
作業年月日	2019 年 9 月 11 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	市川メディカルクリニック 様		TEL: 055-272-3337
所在地	山梨県西代郡市川三郷町高田518-1		ご担当 様
販売店	マコト医科精機株式会社		ご担当 今住 様
納入年月日	平成 27 年 8 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

8/10. オゾン水生成エラー (E110)
 11/12. オーバフロー異常 (E205), レベルセンサー異常 (E214)
 7/10. オーバフロー異常 (E205), レベルセンサー異常 (E214)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施 ※前回定期交換日 2017/9/19

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 671
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ ※交換
☐		☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。カセに対する改善作業として、自己洗浄を実施し、1日の最後に自己洗浄を実施し、清掃を行ってください。

装置情報	交換後運転回数: 225	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 48	殺菌/消毒+アル: 410
	リークチェック: 14	自己洗浄: 1	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1set
ポンセンサー		☒	1	ポン水濃度計用フィルタ		☒	1

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

9/11
 山梨県西代郡市川三郷町高田518番地
 医療法人 市川メディカルクリニック
 理事長 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2019.9.11 青木	2019.9.11 青木