

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 10 月 1 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号: 300343
作業年月日	2019 年 10 月 1 日	作業時間: 2 Hr
顧客名	小川村国民健康保険直営診療所 様	TEL: 026-269-2279
所在地	長野県上水内郡小川村大字高府13467	ご担当 様
販売店	株式会社 スケン	ご担当 今井 様
納入年月日	平成 26 年 9 月 16 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

4/3. オゾン水生成注意(E110), オゾン水生成異常(E207)
5/15, 6/26. オゾン水生成注意(E110), オゾン水生成異常(E207)
7/6. オゾン水生成注意(E110)

不具合原因、作業内容

・保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 568
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒ 必要交換
		☐			☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありません。

装置 情報	交換後運転回数: 158	更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒: 100	殺菌/消毒+7L: 578
	リークチェック: 20	自己洗浄: 20/	アルコール単独: 2	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ、水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ、チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1式
オゾンセンサー		☒	1	給水フィルタのみ(E201)		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

令和元年 10 月 1 日
ご署名 西沢 正成



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2019.10.1 	2019.10.1

Ver.3.1