

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 301475
作業年月日	2020 年 4 月 21 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	関口内科クリニック 様		TEL: 0267-63-5100
所在地	長野県佐久市中込405番地		ご担当 様
販売店	岡野薬品株式会社		ご担当 牛丸 様
納入年月日	平成 30 年 4 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

6/4. 消毒時給水異常 (E202)
10/26 排水異常 2 (E402)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 620
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒ ※交換
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。使用後のお手入れを丁寧に実施いただきありがとうございます。
※消毒用エタノールについて：エタノール油を含まない製品への切り換えをご検討ください。

装置情報	交換後運転回数: 1273	更新(リセット)実施・未実施 ☒	殺菌/消毒: 1038	殺菌/消毒+7L: 909
	リークチェック: /	自己洗浄: 522	アルコール単独: 6	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	/	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	/	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	/	マニホールド周辺チューブ		☐	一式
ポンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

1070 青木

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2020.4.21 青木	2020.4.21 青木