

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300028
作業年月日	2020 年 5 月 26 日		作業時間: 2.5 Hr
顧客名	小林病院 様		TEL: 026-226-7880
所在地	長野県長野市南千歳1丁目14番地2		ご担当 様
販売店	有限会社 ヤヨイメテカル		ご担当 様
納入年月日	2013 年 5 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴なし

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 602
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 / ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐ ※左側の付近腐食	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ ※交換
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。継口接続ゴム及びチューブは変色、劣化が見受けられます。消耗品と見做すので、更新で検討ください。

装置情報	交換後運転回数: 1165	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒: 7347	殺菌/消毒+アル: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 7	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1式
オゾン水濃度計		☒	1	1942フィルター		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水フィルター		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルター		☒	1

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

新井 隆子

新井 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL: 0263-24-2840

責任技術者

作業者

2020.5.26

2020.5.26

青木

青木