

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2019 年 12 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☐		製造番号： 100598
作業年月日	2019 年 11 月 18 日～ 2019 年 11 月 22 日		作業時間： 3 Hr
顧客名	稲田クリニック 様		TEL： 026-263-3811
所在地	長野県長野市稲田3-2919		ご担当 様
販売店	株式会社 千曲医療器		ご担当 藤沢 様
納入年月日	平成 24 年 10 月 11 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・液晶タッチパネルに電源入らず、操作できない。			
不具合原因、作業内容			
・液晶タッチパネルの経年劣化による故障。通電不良。			
⇒0ED-1000用液晶タッチパネル（カラーディスプレイ）に部品交換及び試運転。			
・各部点検、清掃			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 464
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
液晶タッチパネル（カラーディスプレイ）交換、各部点検後、試運転を実施。異常ありません。			
液晶パネルの耐久年数（目安）：2年～5年			

装置情報	交換後運転回数： 4	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 9	殺菌/消毒+7L： 1989
	リークチェック： 75	自己洗浄： 9	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄	R 1 年 12 月 2 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	小 沼 博 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
2019.12.2 青木	2019.12.2 青木