

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300103
作業年月日	2020 年 7 月 14 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	奈良井医院 様		TEL: 0263-52-0695
所在地	長野県塩尻市大字洗馬芦ノ田2588-6		ご担当 様
販売店	中日本行・カリン株式会社 安曇野事業所		ご担当 宮澤 様
納入年月日	平成 26 年 1 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ① 終了ボタンを押しても本体内のファンが止まらない
 ② 排水中の表示となりウォーミングアップが完了せず消毒できない

不具合原因、作業内容

- ・コントロールボード交換
 → 試運転 および、ファンの停止を確認

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 532
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

コントロールボードの交換後、試運転を実施した。内視鏡に対して消毒工程を実施し終了。
 いずれも正常終了、ファンの停止も確認しています。今回の対応は有効となります。

装置情報	交換後運転回数: 49	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒: 6	殺菌/消毒+7L: 986
	リークチェック: 1	自己洗浄: 70%	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐	X	吸盤		☐	X
排水栓		☐		接続コネクタ; 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ; チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		コントロールボード		☒	1
オゾンセンサ		☐		OED1000S Ver. 0207		☐	

お客様ご確認署名欄

2020 年 7 月 14 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

奈良井 慎



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2020.7.14 	2020.7.14