

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 9 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300962
作業年月日	2020 年 9 月 18 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	あおぞらクリニック 様		TEL: 0268-75-1100
所在地	長野県上田市上田原1331		ご担当 様
販売店	中日本テクノサービス株式会社 長野事業所		ご担当 山田 様
納入年月日	平成 24 年 9 月 6 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常履歴なし			
不具合原因、作業内容			
保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 629
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.65 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ありません。 用洗剤「ネオガイムS」で管内			

装置 情報	交換後運転回数: 319	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒: 329	殺菌/消毒+アル: 878
	リークチェック: 1200	自己洗浄: 6	アルコール単独: 1	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
ポンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	R 2 年 9 月 18 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	ご署名 清水 俊明 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2020.9.18 青木	2020.9.18 青木