

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 9 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 100369
作業年月日	2020 年 9 月 15 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	いしぞね内科・外科クリニック 様		TEL: 0261-23-2555
所在地	長野県大町市大町3190-1		ご担当 様
販売店	有限会社 長野医科器械		ご担当 藤原 様
納入年月日	平成 24 年 6 月 1 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
☒ 出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/9, 7/14, 7/21, 7/27, 7/28, 7/29, 7/31 } 原水汚れ異常 (E209)
8/3, 8/4, 8/5, 8/11, 8/17, 8/28, 9/3, 9/4 }

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施
用洗剤「ネオザイムSD」ご案内。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 688
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 / ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐		☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。現場に発生しやすい原水汚れ異常対応について、①給水口を半分程開き（全開にせず）使用してください。②朝使用前に自己洗浄を実施ください。

装置情報	交換後運転回数: 304	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒: 69	殺菌/消毒+AL: 244
	リークチェック: /	自己洗浄: 8	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R 2 年 9 月 15 日

ご署名 中島 ひとり 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者 2020.9.15 	作業者 2020.9.15
------------------------	----------------------