

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 1 月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 100542
作業年月日	2020 年 1 月 23 日		作業時間: Hr
顧客名	彦坂医院 様		TEL: 026-226-6930
所在地	長野市大字観賀七瀬中野 176-1		ご担当 様
販売店	銅林株式会社		ご担当 藤原 様
納入年月日	平成 24 年 7 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
液晶パネル動作不良 700グラム Ver. 0107 / To1.A			
不具合原因、作業内容			
液晶パネル経年劣化による動作不良、通電不良、 ※7年経過			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 427
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐ ※左と右	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
液晶パネル（カラー）交換。試運転及び機械本体内部確認実施。異常ありせん。 補足：液晶パネルの耐用年数は2年～5年が目安となります。			

装置 情報	交換後運転回数: 4	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒: 2481	殺菌/消毒+アル: 3
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1036	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ガン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ: 水槽側		☐	
ガン水濃度計		☐		接続コネクタ: チューブ側		☐	
ガン水濃度計用フィル		☐				☐	
ガンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		年 月 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 彦坂 理博		印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2020.1.23	2020.1.23