

保守点検・修理 報告書

発行日： 2020 年 9 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300381
作業年月日	2020 年 9 月 8 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	金木内科クリニック 様		TEL： 026-226-3553
所在地	長野県長野市安茂里1820		ご担当 様
販売店	協和医科器械株式会社		ご担当 北澤 様
納入年月日	平成 26 年 10 月 2 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・液晶タッチパネルに通電はあるが、画面がフリーズし操作できない。（トップメニューに切り替わらない）

不具合原因、作業内容

・液晶タッチパネルの経年劣化による故障。通電不良。

⇒OED-1000S用液晶タッチパネル（カラーディスプレイ）に部品交換及び試運転。

・各部点検、清掃

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 389
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
	☐			☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

液晶タッチパネル（カラーディスプレイ）交換、各部点検後、試運転を実施。異常ありません。

液晶パネルの耐久年数（目安）：2年～5年となります。

装置 情報	交換後運転回数： 43	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 8	殺菌/消毒+アル： 1117
	リークチェック： 925	自己洗浄： 1735	アルコール単独： 4	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量		交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐			吸盤		☐	
排水栓		☐			接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐			接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐					☐	
オゾンセンサー		☐					☐	

お客様ご確認署名欄

2 年 9 月 8 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

金木利通



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
2020.9.8	2020.9.8