

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2020 年 12 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500441
作業年月日	2020 年 12 月 2 日		作業時間： 2.5 Hr
顧客名	こまつ内科・消化器内科クリニック	様	TEL： 0267-31-5411
所在地	長野県北佐久郡御代田町御代田2333-2		ご担当 様
販売店	中日本メディカル株式会社 佐久営業所		ご担当 石井 様
納入年月日	2019 年 11 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
2/4, 3/20 消毒時給水異常 (E202)			
9/4 オゾン水生成注意 (E110), オゾン水生成異常 (E207)			
10/26 起動時給水異常 (E201), 消毒時給水異常 (E202)			
不具合原因、作業内容			
保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 785
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.23 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0303 / T12A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ありません。			

装置 情報	交換後運転回数： 564 更新（リセット）実施・未実施	消毒（総運転回数）： 128 / 消毒（洗剤洗浄あり）： 127
	消毒＋アル（総運転回数）： 438	/ 消毒＋アル（洗剤洗浄あり）： 435
	リークチェック： 553	自己洗浄： 256
	アルコール単独： 5	エア単独： 14

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 1
交換後 No. 18013037			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ：チューブ側	☒ 1	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1	給水フィルタ E-202	☒ 1
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 12 月 2 日

ご署名 小松信男

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
2020.12.2	2020.12.2

Ver. 1.0

Ver.1.0