

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300807
作業年月日	2020 年 3 月 27 日		作業時間: 2.5 Hr
顧客名	(一社) 日本健診財団長野県支部 ほたるの里 様		TEL: 0266-41-0101
所在地	長野県上伊那郡辰野町1477-6		ご担当 小池 様
販売店	サマックス株式会社		ご担当 緑川 様
納入年月日	平成 28 年 3 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

10/15 酸素圧力異常 (E200)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 632
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 6.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☐	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒ 必交換
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。今回の保守点検で、排水ホース・マニホールド周辺チューブ、給水フィルタ・排水フィルタの交換を実施しました。

装置情報	交換後運転回数: 47 / 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 1295	殺菌/消毒+7L: 4
	リークチェック: 667	自己洗浄: 359	7L単独: 656
			エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水フィルタ(活性炭仕様)		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルタ(活性炭仕様)		☒	1

排水ホース

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 小池 さや佳



2020 年 3 月 27 日

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者

作業者

