

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2020 年 12 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500060
作業年月日	2020 年 12 月 9 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	竹内医院 様	TEL： 026-232-5457	
所在地	長野県長野市南県町655-3		ご担当 様
販売店	有限会社 ヤマダ 様		ご担当 様
納入年月日	2018 年 12 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常履歴なし			
不具合原因、作業内容			
保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 897
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.77 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺フューズ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0303 / T12A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ありません。使用後のお手入れも丁寧に実施いただきありがとうございます。 用手洗淨剤「ネオザイムS」による洗浄（※用手洗淨剤）を完了しました。【後継品】			

装置 情報	交換後運転回数： 83 更新（リセット）実施・未実施	消毒（総運転回数）： 24 / 消毒（洗剤洗浄あり）： 22
	消毒＋アル（総運転回数）： 326	/ 消毒＋アル（洗剤洗浄あり）： 326
	リークチェック： 259	自己洗浄： 265
	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 1set
交換後 No. 17092832			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ：フューズ側	☒ 2	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1	給水フィルタ E-202	☒ 1
				☐		☐

お客様ご確認署名欄		R2 年 12 月 9 日	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		長野市大学南長野南県町655-3番地 医療法人 竹内医院 印 竹内 安仁	
修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店 長野県松本市高宮東5-13 TEL：0263-24-2840		責任技術者	作業者
		2020.12.9 青木	2020.12.9 青木

Ver. 1.0

Ver.1.0