

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 6 月 25 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2021 年 5 月 21 日		作業時間： Hr
顧客名	森川歯科医院	様	TEL： 0475-25-0889
所在地	千葉県茂原市道表21-4		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 1 月 6 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14070138	運転回数： 3334
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー30 真空工程中真空エラー		
停電		
原因		
・真空ポンプダイヤフラム劣化による真空ポンプが弱くなって真空エラー		
・過圧検知圧力スイッチの故障による漏電		
処置、作業内容		
・真空ポンプ交換		
・過圧検知圧力スイッチ交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2	過圧検知圧力スイッチ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		※定期メンテナンスに含む

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

茂原市道表21-4
TEL 0475-25-0889
森川歯科医院
ご署名 森川 龍二 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	富田	安田

クラスBオートクレープ BC-17点検報告書

モリタ用
作業専用
IHIAグリテック製

お客様	名称	森川歯科医院	製造番号	14070138	点検実施日	2021年5月21日	ご承認印
	住所	千葉県茂原市道表21-4	運転回数	3334	点検実施者	IHIAグリテック 安田	
	納入場所		サービス形態	定期メンテナンス	リテイク希望	モリタ千葉営業所	

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☒ ピス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット作動確認
- ☒ ドアロックユニット作動確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ
- ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 滅菌温度センサの汚れ
- ☒ 綱カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フック樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☐ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターのつまり・汚れ

性能評価

- ☐
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック
- ☐

インジケータ貼り付け

【  】

運転確認

合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
・ドアパッキン	1
・真空ポンプ	1
・過圧検知圧カスイッチ	1

株式会社IHIAグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

【代替機】点検・修理依頼書

※スライド貸出厳禁！点検後、ベストな状態で貸出をすること！

依頼内容	点検
	✓
修理	

貸出先 林川歯科医院 様

案件番号

設置時の運転回数 0 回
回収時の運転回数 1154 回

回収日 2021. 6. 29

回収者 鈴木 桑原

機種	ICW
	✓
BC-17	
WD-150	

機番 13100073

※記入時のお願ひ※
違和感がない場合を除き、詳しい情報を書き込むようにしてください。

(X)異音がある → (O)本体下部からこすれたような音がある

(X)水漏れがある → (O)全面左下のドアパッキン辺りから、じわりと水漏れがある

【給水方法】

<ICW・WD>
☐ 水
☐ 水&温水

【ラック・バスケット種類】

<ICW・WD>
☐ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
☐ 止水プラグ使用

有 無
<SUSフィルター洗浄>
有 無

【滅菌バッグ(ICW・BC対応時のみ)】

☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICW・BC対応時のみ)】

☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

☒ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他 ()

【その他特筆事項】

・エアーなしで現地目視

(ご多様にごエラー申告有)