

保守点検・修理 報告書

発行日: 2020 年 4 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300079
作業年月日	2020 年 4 月 14 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	芦澤胃腸科外科 様		TEL: 026-222-2000
所在地	長野県長野市大豆島542-1		ご担当 様
販売店	協和医科器械株式会社		ご担当 鴨井 様
納入年月日	平成 25 年 10 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

5/20 消毒時給水異常, 10/10 濃度維持異常
 1/15 オゾン水生成異常, 1/22 オゾン水生成異常, 1/30 消毒時給水異常
 3/1 オゾン水生成異常, 3/14 オゾン水生成異常 (E215)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 621
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐ ※持ち手部分破損	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

機械動作に異常ありません。 ※次回マニホールド周辺チューブ交換必要。

装置情報	交換後運転回数: 901	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 1834	殺菌/消毒+7L: 2643
	リークチェック: 1	自己洗浄: 1742	7L単独: 5	エア単独: 6

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	150f
排水栓		☒		接続コネクタ; 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒381-0022 長野市大豆島542-1
 医療法人新月会 芦澤胃腸科外科

松 下 啓 二

ご署名 TEL 026-222-2000 FAX 026-222-3758

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2020.4.14 青木	2020.4.14 青木