

## 点検・修理報告書

管理 No.

210557

発行日:

2021年11月18日

|                                                              |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IC Clave                                                     |                                                                                                                                   |
| 作業年月日                                                        | 2021年11月1日 作業時間: 8 Hr                                                                                                             |
| 顧客名                                                          | KAIGAN DENTAL OFFICE こどもの歯医者さん様 TEL: 043-270-7618                                                                                 |
| 所在地                                                          | 千葉県千葉市美浜区高洲3丁目14-6 ご担当 様                                                                                                          |
| 販売店                                                          | ご担当 様                                                                                                                             |
| 納入年月日                                                        | 2016 年 9 月 27 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 付属品                                                    |
| 作業区分                                                         | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                               |
| 出張・引取                                                        | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |
| 装置情報                                                         | 製造番号: 100147 運転回数: 5015回                                                                                                          |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                              |                                                                                                                                   |
| 1. エラー11 蒸気発生器高温異常が発生した。                                     |                                                                                                                                   |
| 2. エラー12 ドアセンサー異常が発生した。                                      |                                                                                                                                   |
| 3. エラー15 蒸気発生器加熱時間オーバー異常が発生した。                               |                                                                                                                                   |
| 4. エラー16 蒸気注入異常が発生した。                                        |                                                                                                                                   |
| 原因                                                           |                                                                                                                                   |
| ・給水タンク内の汚れのため給水フィルターが詰まっており、蒸気発生器への水の流れが悪い状態でした。             |                                                                                                                                   |
| そのため蒸気発生器への水の供給量が不足し、蒸気ヒーターが空焚き状態となり、エラーが発生したと考えられます。(エラー11) |                                                                                                                                   |
| ・上記症状により、蒸気生成量が不足し、蒸気注入不足となったため、ドアロックピンが正常に作動せず、             |                                                                                                                                   |
| エラーが発生したと考えられます。(エラー12、16)                                   |                                                                                                                                   |
| ・空焚きにより、蒸気ヒーターが高温になり断線したため、エラーが発生したと考えられます。(エラー15)           |                                                                                                                                   |
| 処置、作業内容                                                      |                                                                                                                                   |
| ・給水タンクと給水フィルターを清掃いたしました。                                     |                                                                                                                                   |
| ・蒸気ヒーターを交換いたしました。                                            |                                                                                                                                   |
| ・制御基板に故障がありましたので、交換いたしました。                                   |                                                                                                                                   |
| ・缶内フィルターがついておりませんでしたので、取り付けいたしました。                           |                                                                                                                                   |
| 特記事項                                                         |                                                                                                                                   |
| お願い                                                          |                                                                                                                                   |
| ・今回の不具合は、給水タンクの汚れによる給水フィルターの詰まりが原因です。                        |                                                                                                                                   |
| 給水タンクに異物が入らないようにご注意ください。また、給水フィルターは定期的に清掃をお願いいたします。          |                                                                                                                                   |
| ・缶内フィルターは必ず取り付けられた状態で使用してください。故障の原因になります。                    |                                                                                                                                   |

|   | 交換部品名称  | 部品コード | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|---------|-------|--------|----|----|
| 1 | 蒸気ヒーター  |       | 1      |    |    |
| 2 | 缶内フィルター |       | 1      |    |    |
| 3 | 制御基板    |       | 1      |    |    |
| 4 |         |       |        |    |    |
| 5 |         |       |        |    |    |
| 6 |         |       |        |    |    |
| 7 |         |       |        |    |    |
|   |         |       | 部品代 合計 |    |    |
|   |         |       | 技術料    |    |    |
|   |         |       | 出張料    |    |    |
|   |         |       | 合計     |    |    |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

医療法人社団 康樹会  
 年 月 日  
 KAIGAN DENTAL OFFICE  
 千葉市美浜区高洲3-15-2 043-270-7618  
 ご署名 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム  
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
 TEL: 086-944-6528  
 FAX: 086-942-9030

| 品証        | 責任技術者     | 作業者       |
|-----------|-----------|-----------|
| 菊池        | 小山        | 福住        |
| '21/11/17 | '21/11/17 | '21/11/17 |