

点検・修理報告書

管理 No.

20729

発行日：2021 年 11 月 26 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2021 年 11 月 12 日		作業時間： 3 Hr
顧客名	こみね歯科医院 様		TEL： 043-241-2515
所在地	千葉県千葉市中央区汐見丘町9-17		ご担当 様
販売店	ササキ(株)横浜支店		ご担当 様
納入年月日	2014 年 2 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13090012	運転回数： 3409
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・扉ロックソレノイド動かない（ドアが開かない）		
・槽内温度低下		
原因		
・扉ソレノイドが破損していました。・SSR1の破損		
・機械室に漏水が見られました。		
処置、作業内容		
・ソレノイド交換しました。・SSRを交換しました。		
・配管Cより水漏れが有り、取り付けホースバンドの緩みが有りましたので増し締めしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアロックソレノイド		1		
2	SSR1		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 12 月 1 日

ご署名

イイタ

印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '21/11/22 池	富 '21/11/12 田	安 '21/11/12 田