

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2020年 7月 28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>	製造番号： 100542
作業年月日	2020年 7月 28日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	彦坂医院 様	TEL： 026-226-6930
所在地	長野県長野市大字鶴賀七瀬中町176-1	ご担当 様
販売店	鍋林株式会社	ご担当 腰原 様
納入年月日	平成 24年 7月 12日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴
 1/31 殺菌時給水異常 (E202)

不具合原因、作業内容
 保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 606
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.7/ ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレイ	正常 <input checked="" type="checkbox"/> ※左とセン根元ヒビ	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
 異常列挙なし。内視鏡用 用手洗淨剤 『ネオサイムS』 2本入り。

装置情報	交換後運転回数： 172	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 2649	殺菌/消毒+アル： 3
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1120	アルコール単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	吸盤		<input checked="" type="checkbox"/>	1set
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ；水槽側		<input checked="" type="checkbox"/>	2
オゾン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ；チューブ側		<input checked="" type="checkbox"/>	2
オゾン水濃度計用フィルタ		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年 7月 28日

彦坂医院 彦坂興博 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL：0263-24-2840

責任技術者 2020.7.25 青木	作業者 2020.7.25 青木
--------------------------	------------------------