

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 7 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300907
作業年月日	2020 年 7 月 21 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	黒沢内科 様		TEL: 055-263-3400
所在地	山梨県笛吹市石和温泉町市部716-5		ご担当 様
販売店	豊前医化株式会社		ご担当 様
納入年月日	平成 28 年 6 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

6/26 光量低下異常 1 (E210)
ラングセル異常 (E212)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 50%
オゾンセンサー	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒ ※交換
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。内視鏡用 用手洗淨剤「ネオザイムS」に準拠

装置情報	交換後運転回数: 57	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 487	殺菌/消毒+アル: 930
	リークチェック: 9/6	自己洗浄: 615	アルコール単独: 27	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	一式
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 7 月 21 日

〒406-0031 山梨県笛吹市石和町市部716-5

黒沢内科

ご署名

院長 黒沢 明彦

印

TEL 055-263-3400 FAX 055-263-0871

責任技術者

作業者

2020.7.21/

2020.7.21/



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840