

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 8 月 7 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500348
作業年月日	2020 年 8 月 7 日		作業時間: 3 Hr
顧客名	佐久平ファミリークリニック 様		TEL: 0267-88-7200
所在地	長野県佐久市岩村田1315番地1		ご担当 様
販売店	協和医科器械株式会社		ご担当 鴨井 様
納入年月日	2019 年 7 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
10/21. オゾン水 生成故障 (E110)			
11/12. オゾン水 生成故障 (E110) ・ オゾン水 生成異常 (E207)			
4/2, 8/6. オーバーフロー異常 (E205)			
不具合原因、作業内容			
保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 562
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒ ※トレイセンサ位置調整	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
異常ありません。用手洗浄有り『ネオサイム』で洗浄。			

装置 情報	交換後運転回数: 744 更新 (リセット) 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 252 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 21 229.0
	消毒+アル (総運転回数): 494	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 0. 494.0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 235
	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 1
交換後 No. 51905193			排水栓	☒ 1	エアフィルタ	☐ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ側	☒ 1	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1	給水フィルタ E-202	☒ 1
				☐	洗剤ホケット	☒ 1

お客様ご確認署名欄	年 2. 8. 月 7 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	院長 木村 雅 樹
	ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2020.8.7	2020.8.7
青木	青木

Ver. 1.0

Ver.1.0