

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 8 月 11 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500354
作業年月日	2020 年 8 月 11 日		作業時間: 3 Hr
顧客名	高山内科明生会	様	TEL: 0263-47-3500
所在地	長野県松本市島内1788-2		ご担当 様
販売店	岡野薬品株式会社		ご担当 保科 様
納入年月日	2019 年 7 月 31 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/31, 8/3, 8/29, 9/12, 原水汚れ異常 (E209)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 826
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありません。※給水フィルターのみ交換済み

装置 情報	交換後運転回数: 54	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 6	消毒 (洗剤洗浄あり): 1-1-0
	消毒+アル (総運転回数): 50		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 0.49.0	
	リークチェック: 0	自己洗浄: 54	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 1
交換後 No. 180832701			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ側	☐	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1	給水フィルター E-202	☒ 1
				☐	洗剤ホケット	☒ 1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 8月 11日
 〒390-0851 松本市島内1788-2
 TEL・FAX 47-3500

二重 医療法人 高山内科明生会

理事長

責任技術者

作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL: 0263-24-2840

2020.8.11 2020.8.11

Ver. 1.0

Ver.1.0