

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 10 月 19 日

|       |                                                                                                                           |                                                                       |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                     |                                                                       | 製造番号: 301014      |
| 作業年月日 | 2020 年 10 月 19 日                                                                                                          |                                                                       | 作業時間: 1.5 Hr      |
| 顧客名   | もみのき内科クリニック 様                                                                                                             |                                                                       | TEL: 026-272-3610 |
| 所在地   | 長野県千曲市寂蒔 9 1 3                                                                                                            |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 鍋林株式会社                                                                                                                    |                                                                       | ご担当 腰原 様          |
| 納入年月日 | 平成 28 年 10 月 13 日                                                                                                         | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                                       |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴 なし

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

|          |                                                                               |              |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 613    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          | <input type="checkbox"/>                                                      |              | <input type="checkbox"/>                           |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。

用手洗淨剤「ネオザイム」消毒済。

|      |              |                                                    |              |               |
|------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 73  | 更新（リセット）実施・未実施 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌/消毒: 32    | 殺菌/消毒+7L: 271 |
|      | リークチェック: 296 | 自己洗浄: 3                                            | 7Lアルコール単独: 2 | エア単独: 0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量    |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|-------|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤            |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 set |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ; 水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2     |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ; チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2     |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |       |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |       |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R 2 年 10 月 19 日

ご署名 院長 南部 江美



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店  
長野県松本市高宮東5-13  
TEL: 0263-24-2840

| 責任技術者          | 作業者            |
|----------------|----------------|
| 2020.10.19<br> | 2020.10.19<br> |