

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業者用
IHIアグリテック用

お客様	名称	石井歯科クリニック	製造番号	14090205	点検実施日	2021年8月17日	承認印	3#
	住所	千葉県香取市北1-2-7	運転回数	6034	点検実施者	エムシーサービス㈱ 佐藤		
	納入場所		サビス形態		モリタ担当部署			

計装(安全)

- 圧力計0点指示誤差
- ドア**
- フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- フック取付け状態・動作確認
- フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ドアカバーの取り付け状態・割れ
- フック検出ユニット動作確認
- ドアロックユニット動作確認
- 蓋板のキズ・汚れ
- 開閉ハンドルの損傷確認
- 缶体**
- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 滅菌温度センサの汚れ
- 網カゴの破損、汚れ
- 缶内ストレーナーの損傷・汚れ
- 配管系**
- フッ素樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- 給気弁の動作状態・漏れ
- 排蒸弁の動作状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の動作状態・漏れ
- 滅菌弁の動作状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の動作状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(滅菌室)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧検知圧カススイッチの動作状態・漏れ
- ラジエーターの取り付け状態・漏れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ 902回
- エアーフィルターのつまり、汚れ 39回

性能評価

- B&Dテスト実施
- ケミカルインジケータによる判定
- リークチェック - 86.3kpa
- キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

運転確認

<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	/

蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの動作状態・異音・漏れ
- 逆支弁の動作状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
1-7 Test - 7.86.3kpa
- 真空到達速度
BD Test - 93.3kpa

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 蓋・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

株式会社IHI物流産業システム
 環境ソリューションBU サービスグループ
 〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030