

保守点検・修理 報告書

管理 No. 12-03187

発行日: 2020 年 11 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 301016
作業年月日	2020 年 11 月 10 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	安茂里堀越内科クリニック 様		TEL: 026-229-5890
所在地	長野県長野市安茂里字本上河原8172-2		ご担当 様
販売店	岡野薬品株式会社 長野営業所		ご担当 小林 様
納入年月日	平成 28 年 10 月 11 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・液晶タッチパネルに通電はあるが、画面がフリーズし操作できない。(トップメニューに切り替わらない)

不具合原因、作業内容

・液晶タッチパネルの経年劣化による故障。通電不良。

⇒OED-1000S用液晶タッチパネル(カラーディスプレイ)に部品交換及び試運転。

・各部点検、清掃

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 517
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

液晶タッチパネル(カラーディスプレイ)交換、各部点検後、試運転を実施。異常ありません。

液晶パネルの耐久年数(目安): 2年~5年となります。 ※別紙定期保守メンテナンスを合わせ実施

装置 情報	交換後運転回数:	更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒:	殺菌/消毒+アル:
	リークチェック:	自己洗浄:	アルコール単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ; 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ; チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	021118

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒380-0954 長野市安茂里字本上河原8172-2

安茂里堀越内科クリニック

院長 堀越 正二郎

ご電話 (026) 229-5890 FAX 229-5891

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作者
2020.11.18 	2020.11.18