

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 12 月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500050
作業年月日	2020 年 12 月 16 日		作業時間: 2.5 Hr
顧客名	安藤病院	様	TEL: 0268-22-2586
所在地	長野県上田市中央西1-1-20		ご担当 様
販売店	アスサイ株式会社 長野営業所		ご担当 今井 様
納入年月日	2018 年 11 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
7/9, 8/27, 10/15 オゾン水生成異常 (E110) オゾン水生成異常 (E207)	
不具合原因、作業内容	
保守点検作業実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ ハル数 907
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0303 / T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
機械動作に異常ありません。フタ裏に付いている10ヶ所がはがれていたので、処置しました。 用手洗済あり。レオオキシ後継品「ネオサイム5」ご案内	

装置 情報	交換後運転回数: 254 更新 (リセット) 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 288 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 285
	消毒+アル (総運転回数): 299	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 298
	リークチェック: 0	自己洗浄: 174
	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	吸盤	☒	1set
交換後 No. 18023061			排水栓	☒	1	エアフィルター	☒	1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ側	☒	2	水フィルター	☒	1
☐			オゾン水濃度計用フィルタ	☒	1	給水フィルタ E-202	☒	1
☐			☐			☐		

お客様ご確認署名欄	2020 年 12 月 16 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	医療法人 安藤病院 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2020.12.16	2020.12.16

Ver. 1.0

Ver.1.0