

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 1 月 28 日

|       |                                                                                                                           |                                                                       |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus                                                                                               |                                                                       | 製造番号: 500061      |
| 作業年月日 | 2021 年 1 月 28 日                                                                                                           |                                                                       | 作業時間: 2.5 Hr      |
| 顧客名   | おおくにクリニック                                                                                                                 | 様                                                                     | TEL: 055-288-0092 |
| 所在地   | 山梨県甲府市大里町5125                                                                                                             |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 株式会社 匠メカ                                                                                                                  |                                                                       | ご担当 中島 様          |
| 納入年月日 | 2019 年 1 月 25 日                                                                                                           | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                                       |                   |

|                                       |                                                                               |              |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                       |                                                                               |              |                                                       |
| 12/6 濃度維持異常 (E202)                    |                                                                               |              |                                                       |
| オゾン水 生成異常 (E110)                      |                                                                               |              |                                                       |
| オゾン水 生成異常 (E207)                      |                                                                               |              |                                                       |
| 不具合原因、作業内容                            |                                                                               |              |                                                       |
| 保守点検作業実施                              |                                                                               |              |                                                       |
| 点検項目                                  |                                                                               |              |                                                       |
| フタロック                                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 水槽 LED       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 酸素ライン                                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| アルコールライン                              | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 753       |
| オゾンセンサ                                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 給水ライン                                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 濃度計流量                                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input type="checkbox"/>                           |
| 水位センサー                                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.76 ppm    |
| 水漏れ確認                                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 清掃                                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| トレイ                                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 消毒 チューブ類     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 水槽側コネクタ                               | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 小物入れ                                  | <input type="checkbox"/> ※両側面にヒビ                                              | 運転プログラムバージョン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0303/T12A |
| 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項            |                                                                               |              |                                                       |
| 異常ありません。使用後のお手入れと消毒に実施いただきありがとうございます。 |                                                                               |              |                                                       |
| 用手洗淨剤「ネオサンムバ」ご案内。                     |                                                                               |              |                                                       |

|          |                    |                                                      |                     |                 |
|----------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 145       | 更新 (リセット) 実施・未実施 <input checked="" type="checkbox"/> | 消毒 (総運転回数): 52      | 消毒 (洗剤洗浄あり): 48 |
|          | 消毒+アル (総運転回数): 183 |                                                      | 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 183 |                 |
|          | リークチェック: 0         | 自己洗浄: 145                                            | アルコール単独: 0          | エア単独: 0         |

| 交換部品名称           | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 交換・数量                                 | 交換部品名称       | 交換・数量                                    |
|------------------|-------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| オゾン水濃度計          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | オゾン分解触媒       | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | 吸盤           | <input checked="" type="checkbox"/> 1set |
| 交換後 No. 51911318 |                                     |    | 排水栓           | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | エアフィルター      | <input checked="" type="checkbox"/> 1    |
| オゾンセンサー          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: チューブ側 | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | 水フィルター       | <input checked="" type="checkbox"/> 1    |
|                  | <input type="checkbox"/>            |    | オゾン水濃度計用フィルタ  | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | 給水フィルタ E-202 | <input checked="" type="checkbox"/> 1    |
|                  |                                     |    |               | <input type="checkbox"/>              |              | <input type="checkbox"/>                 |

|                                                                                                                            |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| お客様ご確認署名欄                                                                                                                  |                   | 年 3 月 28 日   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。</li> <li>本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。</li> </ul> |                   | ご署名 内藤 恵     |
| 修理業者                                                                                                                       | 新鋭工業 株式会社 長野支店    | 責任技術者        |
|                                                                                                                            | 長野県松本市高宮東5-13     | 作業者          |
|                                                                                                                            | TEL: 0263-24-2840 | 2021/1/28 青木 |
|                                                                                                                            |                   | 2021/1/28 青木 |

Ver. 1.0

Ver.1.0