

保守点検・修理 報告書

発行日: 2021 年 2 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300782
作業年月日	2021 年 2 月 25 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	北原医院 様		TEL: 0265-85-2214
所在地	長野県上伊那郡宮田村162		ご担当 様
販売店	鍋林株式会社		ご担当 腰原 様
納入年月日	平成 28 年 2 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

11/17 ヒータ-異常 (E105)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 482
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒ ※交換
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。
用手洗淨剤「ネオサイム」の消毒済

装置情報	交換後運転回数: 63	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 33	殺菌/消毒+アル: 423
	リークチェック: 0	自己洗浄: 155	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ、水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ、チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1式
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 2 月 25 日

長野県上伊那郡宮田村162番地

医療法人 北原医院

ご署理 理事長 北原 靖 印

TEL 0265-85-2214 作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

2021.2.25 2021.2.25
青木 青木