

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 4 月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 301476
作業年月日	2021 年 4 月 23 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	いちよう並木クリニック 様		TEL： 0266-58-5522
所在地	長野県諏訪市四賀2417-2		ご担当 様
販売店	株式会社 IM・I-		ご担当 西尾 様
納入年月日	平成 30 年 4 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3/5 消毒時給水量異常 (E202)
2/22 水位低下異常 (E300)
2/26, 3/10 消毒時給水量異常 (E202)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 442
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒ ※左ヒヤン根元へ配線	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ ※交換
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。
用手洗浄剤「ネオサイアス」で洗浄。

装置情報	交換後運転回数： 630	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 586	殺菌/消毒+7L： 1111
	リークチェック： 1	自己洗浄： 60	7L単独： 2	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	一式
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 4 月 23 日

ご署名

小松 信彦



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
2021.4.23 貴木	2021.4.23 貴木