

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300295
作業年月日	2021 年 5 月 20 日		作業時間: 2.5 Hr
顧客名	市川医院 様		TEL: 0267-25-1200
所在地	長野県小諸市市町5丁目3番8号		ご担当 様
販売店	械株式会社 千曲三悠堂		ご担当 丸山 様
納入年月日	平成 26 年 5 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴 6/6 消毒時給水異常 (E202)
7/21 オゾン水生成注意 (E110)

不具合原因、作業内容

本体内部より水漏れを確認しました。
対応については 明日 12:00頃までにご連絡させていただきます。
※定期保守交換部品は取付済です。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 524
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☐ ※水槽下部より水漏れ有	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ ※交換
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期保守時に交換部品は全て取付けました。本体内部（水槽下部）に水漏れを確認しました。対応については 5/21 12時頃迄にご案内致します。ご不便をおかけします。

装置情報	交換後運転回数: 246	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒: 1293	殺菌/消毒+アル: 2591
	リークチェック: 3	自己洗浄: 1057	アルコール単独: 23	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	/	接続コネクタ: 水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	/	接続コネクタ: チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ	チタン	☒	/	マニホールド周辺チューブ		☒	1式
ポンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

市川 卓郎



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者

2021.5.20



作業者

2021.5.20

