

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 8 月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500348
作業年月日	2021 年 8 月 5 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	高山内科明生会	様	TEL： 0263-47-3500
所在地	長野県松本市島内1788-2		ご担当 様
販売店	岡野薬品株式会社		ご担当 保科 様
納入年月日	2019 年 7 月 31 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
異常履歴 なし	
不具合原因、作業内容	
保守点検作業実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バル数 784
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0304/T12A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ありません。	

装置 情報	交換後運転回数： 38 更新（リセット）実施・未実施	消毒（総運転回数）： 6 / 消毒（洗剤洗浄あり）： 2
	消毒+アル（総運転回数）： 88	/ 消毒+アル（洗剤洗浄あり）： 87
	リークチェック： 0 自己洗浄： 90	7Lコル単独： 0 エア単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 1set
交換後 No. 51811051			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ；チューブ側	☒ 2	水フィルター	☒ 1
☐			オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1	給水フィルター E-202	☒ 1
☐			☐		☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年8月5日

〒390-0851 松本市島内1788-2
TEL0263-47-3500 FAX0263-48-1757

医療法人 高山内科明生会
ご署名 理事長 前島さやか

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
2021.8.5	2021.8.5

Ver.1.0

Ver.1.0