

保守点検・修理 報告書

発行日: 2021 年 9 月 29 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300380
作業年月日	2021 年 9 月 29 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	窪田外科胃腸科医院 様		TEL: 0263-58-4522
所在地	長野県松本市寿中1丁目43-7		ご担当 大和 様
販売店	松本日興医療商事株式会社		ご担当 大和 様
納入年月日	平成 26 年 9 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴なし

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 434
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐ ※右側モーター貸出中	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。OED専用トレイについては、松本日興医療商事(株)大和様へ通じ御見積提示させて頂いております。

装置情報	交換後運転回数: 175	更新(リセット)実施・未実施 ☒	殺菌/消毒: 130	殺菌/消毒+7L: 1299
	リークチェック: /	自己洗浄: 2	アルコール単独: /	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	/	接続コネクタ; 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	/	接続コネクタ; チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2021 年 9 月 29 日

大和 子み子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者

2021.9.29

青木

作業者

2021.9.29

青木