

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 7 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 301222
作業年月日	2020 年 7 月 15 日		作業時間: 2.5 Hr
顧客名	きたむらファミリークリニック 様		TEL: 026-247-6622
所在地	長野県上高井郡小布施町大字福原216-10		ご担当 様
販売店	中日本パナソニック株式会社 長野事業所		ご担当 小林 様
納入年月日	平成 29 年 7 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1/4. 濃度制御注意 (E109)
6/5 排水異常 2 (E402)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 586
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒ 必要交換
☐			☐		

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。
※用平洗淨剤でオゾン水で洗浄

装置情報	交換後運転回数: 2187	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒: 3988	殺菌/消毒+アル: 2282
	リークチェック: 2183	自己洗浄: 125	アルコール単独: 10	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	一式
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 2020.7.15 日

ご署名

田幸みち代

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2020.7.15 青木	2020.7.15 青木