

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300295
作業年月日	2021 年 5 月 24 日 ~ 2021 年 6 月 30 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	市川医院 様		TEL: 0267-25-1200
所在地	長野県小諸市市町5丁目3番8号		ご担当 様
販売店	株式会社 千曲三悠堂		ご担当 丸山 様
納入年月日	平成 26 年 5 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・ 本体内部（殺菌槽下部）より水漏れ

不具合原因、作業内容

・ トレインバルブ ASSY762210281 パッキン劣化及びナットの経年劣化による水漏れ

⇒ トレインバルブ ASSY762210281 新品部品に交換及び試運転。

・ 各部点検、清掃

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 495
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

トレインバルブ ASSY交換後、各部点検、試運転を実施。 異常ありません。

修理完了品の設置後試運転を実施致しました。異常ありません (21)

装置情報	交換後運転回数: 6	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 1298	殺菌/消毒+7L: 2592
	リークチェック: 3	自己洗浄: 1059	アルコール単独: 23	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ: 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ: チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

市川 卓郎

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2021/7/1 青木	2021/7/1 青木