

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 11 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 301016
作業年月日	2021 年 11 月 17 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	安茂里堀越内科クリニック 様		TEL: 026-229-5890
所在地	長野県長野市安茂里字本上河原8172-2		ご担当 様
販売店	岡野薬品株式会社 長野営業所		ご担当 小林 様
納入年月日	平成 28 年 10 月 11 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
異常履歴なし	
不具合原因、作業内容	
保守点検作業実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 688
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒ 必要交換
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ありません。 マニホールド周辺チューブ一式交換致しました。	

装置 情報	交換後運転回数: 4	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒: 143	殺菌/消毒+アル: 37
	リークチェック: 0	自己洗浄: 10	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	一式
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	〒380-0954 長野市安茂里字本上河原8172-2 安茂里堀越内科クリニック 院長 堀越 正二郎 TEL (026) 229-5890 FAX 229-5891
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2021.11.17 青木	2021.11.17 青木