

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 12 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500050
作業年月日	2021 年 12 月 21 日		作業時間： / Hr
顧客名	安藤病院 様	TEL： 0268-22-2580	
所在地	長野県上田市中央西1-1-20	ご担当 様	
販売店	アサシエ株式会社 長野営業所		ご担当 太田 様
納入年月日	2018 年 11 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
3/2 ランノ切れ異常 (E212)	
5/28 消毒時 給水異常 (E202)	
10/7, 11/16, 11/8, 12/10 ランノ切れ異常 (E212)	
不具合原因、作業内容	
保守点検作業実施	
給水フィルター (E-202) 交換	
ランノ切れ異常対応：オゾン濃度計交換 (一時的紫外線ランプ光量低下)	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 947
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0303/T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
異常ありません。給水フィルター (E-202) 交換済み。	

装置 情報	交換後運転回数： 294 更新 (リセット) 実施・未実施	消毒 (総運転回数)： 401 / 消毒 (洗剤洗浄あり)： 397
	消毒+アル (総運転回数)： 480	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 479
	リークチェック： 0	自己洗浄： 277
	アルコール単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 1set
交換後 No. 20033981			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ：チューブ側	☐	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1	給水フィルター E-202	☒ 1
				☐		☐

お客様ご確認署名欄	3 年 12 月 21 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	中央西1丁目1番20号
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	安藤病院 印
ご署名	

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
2021.12.21 青木	2021.12.21 青木

Ver. 1.0

Ver.1.0