

保守点検・修理 報告書

発行日： 2021 年 6 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 301185
作業年月日	2021 年 6 月 18 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	いしぐろクリニック 様		TEL： 026-286-6363
所在地	長野県長野市川中島町御厨706-1		ご担当 様
販売店	岡野薬品株式会社		ご担当 矢島 様
納入年月日	平成 29 年 6 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
(出張・引取)	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

8/17, 8/19, 8/21, 8/24, 8/31, 9/1, 9/2, 9/4, 9/7, 9/8, 9/10, 9/14
 オゾン水生成注意 (E110) + オゾン水生成異常 (E207)
 8/19, 8/24, 9/2, 9/4, 9/10, 濃度維持異常 (E302)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 676
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ ※交換
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。夏場に頻発しているオゾン水生成注意・異常対策として酸素の供給量を若干増やしました。改善しない場合お手数ですが、お手持ちの機器を交換させていただきます。

装置情報	交換後運転回数： 1402	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 1118	殺菌/消毒+7L： 4270
	リークチェック： 4992	自己洗浄： 1148	7Lコールド： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	1942 プラグ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	一式

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 18 日

ご署名

村松 愛子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL：0263-24-2840

責任技術者

2021.6.18

青木

作業者

2021.6.18

青木