

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 9 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 100369
作業年月日	2021 年 9 月 9 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	いしぞね内科・外科クリニック 様		TEL: 0261-23-2555
所在地	長野県大町市大町3190-1		ご担当 様
販売店	有限会社 長野医科器械		ご担当 藤原 様
納入年月日	平成 24 年 6 月 1 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3/15 酸素圧力異常 (E200)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 475
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。★一日の最後に自己洗浄の実施も行ってください。水槽内を清潔に保ちやすくなります。

装置情報	交換後運転回数: 468	更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒: 185	殺菌/消毒+AL: 596
	リークチェック: 2	自己洗浄: 26	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
ポンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 9 月 9 日

ご署名 中島 ひとし 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2021.9.9 青木	2021.9.9 青木