

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

12-02888

No. 200212

配布先	客先	納入先	新鋭工業（株）長野支店	殿	機種	OED-1000S
環営	環品	顧客名	日比優一クリニック	様	機番	300342
		所在地	長野県上田市上田原158-1		納入日	2014年09月24日
		点検者	中澤 一裕	作業時間	受付日	2019年10月28日
計	3	返送先	納入先と同じ			

修理依頼・不具合内容

内視鏡管路への送気系統及び各部点検

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果

1-1 送気系統（2019年11月ご報告済み）


- ・エアポンプおよび電磁弁の動作点検・・・異常ありませんでした
- ・エアポンプの最大送気圧力を確認・・・異常ありませんでした

32.9KPa（AC100V 60Hz, 管路閉塞状態）

1-2 全体点検

- ・オゾン発生系統・・・異常ありませんでした
- ・電気系統・・・納入から5年経過しているため、タッチパネル、基板を予防的に交換しました

写真：交換部品

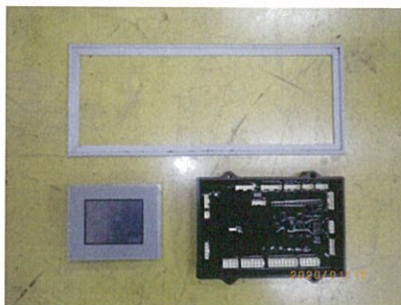

[2] 修理内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：1060 殺菌：2969、殺菌＋アルコール：3306、リークチェック：2843
自己洗浄：1087、アルコール単独：19、エア単独：497

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	タッチパネル	1台	
2	コントロール基板	1枚	今回無償
3	フタパッキン	1枚	
4	配管チューブ	1式	写真なし

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIパウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528

承認



責任技術者



作成

R02.2.12

中澤