

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 12 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500441
作業年月日	2021 年 12 月 2 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	こまつ内科・消化器内科クリニック	様	TEL： 0267-31-5411
所在地	長野県北佐久郡御代田町御代田2333-2		ご担当 様
販売店	中日本メディカル株式会社 佐久営業所		ご担当 石井 様
納入年月日	2019 年 11 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
12/1 消毒槽異常 (E101), 消毒時給水異常 (E202) 6/12 酸素圧力異常 (E200), 7/15 オート-異常 (E205) 9/15 濃度維持異常 (E302), 12/2 酸素圧力異常 (E200)	
不具合原因、作業内容	
保守点検作業実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 784
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0303 / T12A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ありません	

装置 情報	交換後運転回数： 83 / 更新（リセット）実施・未実施	消毒（総運転回数）： 342 / 消毒（洗剤洗浄あり）： 34 /
	消毒＋アル（総運転回数）： 1055	消毒＋アル（洗剤洗浄あり）： 1049
	リークチェック： 1373	自己洗浄： 54 / アルコール単独： 14 エア単独： 14

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ /	吸盤	☒ 1set
交換後 No. 18103348			排水栓	☒ /	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ：チューブ側	☒ /	水フィルター	☒ 1
☐			オゾン水濃度計用フィルタ	☒ /	給水フィルタ E-202	☒ 1
			☐		☐	

お客様ご確認署名欄		3 年 12 月 2 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		ご署名 小松 信 男
修理業者	新鋭工業 株式会社 長野支店 長野県松本市高宮東5-13 TEL：0263-24-2840	責任技術者 2021.12.2 青木
		作業者 2021.12.2 青木

Ver. 1.0

Ver.1.0