

保守点検・修理 報告書

管理 No. 220112-01
発行日: 2022 年 1 月 12 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.	製造番号 300198
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業年月日 2022 年 1 月 12 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	片桐内科クリニック 様	TEL: 026-215-1900
所在地	長野県長野市上松4-33-7	ご担当 様
販売店	鍋林株式会社 様	ご担当 腰原 様
納入年月日	2014 年 1 月 15 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 8 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守の時期の為、実施。	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検実施。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 397
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0204 / T04C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ございません。	

装置 情報	交換後運転回数:	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒: /	殺菌/消毒+7L: /
	リークチェック:	自己洗浄:	7Lコ-ル単独:	エア単独:

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒		1	オゾン分解触媒 ☒	1	吸盤 ☒	3
交換後 No. 11080747			排水栓 ☒	1	エアフィルター ☐	
オゾンセンサー ☒		1	接続コネクタ: 水槽側 ☒	2	水フィルター ☐	
☐			接続コネクタ: チューブ側 ☒	2	マニホールド ☐	
			オゾン水濃度計用フィルタ ☒	1	周辺チューブ ☐	

お客様ご確認署名欄	2022 年 1 月 12 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	〒380-0802 長野県長野市上松4-33-7
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	片桐内科クリニック
	ご署名 理事長 片桐 昌 尋 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者	作業者
	