

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2022 年 1 月 19 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.	製造番号 300103
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業年月日 2022 年 1 月 19 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間 / Hr
顧客名	奈良井医院 様	TEL : 0263-52-0695
所在地	長野県塩尻市洗馬2588-6	ご担当 様
販売店	中日本メディカルリンク株式会社	ご担当 宮澤 様
納入年月日	2014 年 1 月 7 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 8 回目 定期点検シート記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守の時期の為、実施。	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検実施。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 545
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0207 / TQ2BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ございません。	

装置 情報	交換後運転回数： 113	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 7 /	殺菌/消毒+7日： 1100 /
	リークチェック： 1	自己洗浄： 892	7日単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ；水槽側	☒ 2	水フィルター	☐
☐			接続コネクタ；チューブ側	☒ 2	☐	☐
			オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1	☐	☐

お客様ご確認署名欄	4 年 1 月 19 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 医療法人 奈良井医院 印	

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL : 0263-24-2840

責任技術者	作業者
	