

OED-1000部品交換・点検報告書

お客様 新鋭工業株式会社 岡山支店 御中 製造番号 100 389  
 住所 岡山市北区中島町1-7-8  
 点検者 上野省吾 点検日:平成25年 5 月 22 日

◎作業前: 水道の蛇口(開・閉) ポンベ元栓(開・閉) キャスター(ON・OFF) 主電源(ON・OFF)

|       | チェック箇所          | 内容                             | チェック                                                                       | 備考 |
|-------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 現状確認  | タッチパネル装置情報      |                                |                                                                            |    |
|       | プログラム           | Ver.010 /T01.A                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |
|       | 納入年月日           | 2011 年 07 月 22 日               |                                                                            |    |
|       | 前回定期交換日         | 2011 年 07 月 22 日               |                                                                            |    |
|       | 交換後運転回数         | ( 923 )回                       |                                                                            |    |
|       | 運転回数(殺菌)        | A( 513 )回                      |                                                                            |    |
|       | 運転回数(殺菌+アル)     | B( 410 )回                      |                                                                            |    |
|       | 運転回数(リークチェック)   | ( 2 )回                         |                                                                            |    |
|       | 運転回数(自己洗浄)      | ( 131 )回                       |                                                                            |    |
|       | 運転回数(アルコール単独)   | ( 0 )回                         |                                                                            |    |
|       | 運転回数(エア単独)      | ( 4 )回                         |                                                                            |    |
| 作業・点検 | コントロール基板交換      | 基板の固定 ネジ4箇所<br>コネクタ接続 12箇所     | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> |    |
|       | シリコンチューブ点検      | 3000回以上 劣化の有無                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |
|       | A+Bで3000回以上のみ確認 | 3000回以下                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |
|       | アッパーパネル         | ネジ4箇所<br>取り付け状態の確認             | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> |    |
|       | サイドパネル          | 樹脂ワッシャ付ネジ5箇所<br>取り付け状態の確認      | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> |    |
|       | リヤパネル           | ネジ9箇所<br>取り付け状態の確認             | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> |    |
|       | 排水ホース           | 接続状態、取り回し、ホース折れの有無             | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |
|       | 給水ホース           | 接続状態、取り回し、ホース折れの有無             | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |
|       | 酸素配管            | 接続状態、取り回し、ホース折れの有無             | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |
|       | 装置外観検査          | トレイ、排水栓、フタ、タッチパネル<br>などに異常はないか | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |
|       | バージョンアップ確認      | Ver.0107/T01.A                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |
|       | 運転              |                                |                                                                            |    |
|       | 殺菌運転を実施         | 異音・水漏れがなく正常終了したか               | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |
|       | 殺菌履歴            | 平均オゾン水濃度( 0.72 )ppm            | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |

◎現状復帰 : 水道の蛇口(開・閉) ポンベ元栓(開・閉) キャスター(ON・OFF) 主電源(ON・OFF)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 作業結果、連絡事項、特記事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <p>特になし</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <p>お客様ご確認署名欄</p> <p>内容をよくご確認の上ご署名いただきますようお願いいたします。</p> <p>本作業にて知れた個人情報他は他の目的では使用いたしません。</p> <p>                         25 年 5 月 23 日                         <span style="float: right;">                             大倉支店長 田中 浩二                             <br/>                             印                         </span> </p> |  |