

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 6 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100389
作業年月日	平成 25 年 6 月 18 日		作業時間:	1.2 Hr
顧客名	(株)エフエツバウラ 所有デモ機		TEL:	086-944-6528
所在地	岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 23 年 4 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 2 年 / 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ ハルス数 443
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☐
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☐
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☐
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
完了	

装置 情報	交換後運転回数:	935 更新(リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌:	523	殺菌+アル:	412
	リークチェック:	2	自己洗浄:	135	アルコール単独:	0
					エア単独:	5

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☒	2
排水栓		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	2
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年	月 日
ご署名	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
 岡山県岡山市北区中島田町 1-7-8
 TEL: 086-235-0323

責任技術者	作業者
	