

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-35838

No. 130912

配布先	納入先	新鋭工業（株）東京支店 殿			機種	OED-1000
客先	顧客名	西村記念病院 様			機番	100081
環営	所在地	東京都江戸川区平井3丁目25-17			—デモ用機械—	
環品	点検者	中澤 一裕	作業時間		受付日	平成25年9月2日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	
計	3					

修理依頼・不具合内容

タッチパネル起動不良
※画面が真っ黒の状態、操作できない。

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

タッチパネルの起動不良は再現しませんでした、通電後にタッチパネルの電源が一時的に切れる現象を確認しました。
タッチパネルの電源部品で「DC/DCコンバータ」が損傷していると思われます。
本機はタッチパネルを交換して復旧しました。

今後、同様な不具合が起きないように、タッチパネルの電源を保護する部品を追加し、運転プログラムを最新に交換しました。

〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換（下表をご参照ください）
- 2：タッチパネルプログラムバージョンアップ
- 3：コントロール基板プログラムバージョンアップ
- 2：オゾン水濃度測定：0.71ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・・・・・・・・・・・正常

〔3〕装置情報

殺菌：561 殺菌+アルコール：116 リークチェック：28 自己洗浄：163、ア単独：2 エア単独：49

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762302530	タッチパネル	1個	バリスタ追加

承認

安
25.9.12
田

審査

中
25.9.12
澤

作成

中
25.9.12
澤

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528