

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20130111

発行日 平成 25 年 1 月 1 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100391	
作業年月日	平成 25 年 1 月 8 日		作業時間:	4.0	Hr
顧客名	新鋭工業(株)大阪支店 殿		TEL:	06-6228-3311	
所在地	大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1		担当	福田	様
販売店			担当		様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 / 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・OED-1000S プログラム入替
- ・保守点検依頼

不具合原因、作業内容

異常履歴より

殺菌時給水異常(E:202) 50回発生、起動時給水異常(E:201) 3回発生。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 入数: 491
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☐ 未実施
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

水位センサーの検知感度は問題ありませんでした。排水栓のリミットスイッチを調整する金具(ステー:排水)を交換しましたので、様子を見てくださいますようお願いいたします。

装置 情報	交換後運転回数: 37⇒0	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 171	殺菌+アル: 233
	リークチェック: 0	自己洗浄: 155	アルコール単独: 0	エア単独: 5

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	ステー; 排水		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 工場点検により不要

印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者

