

修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号 02-44524 No. 140904

配布先	発送	新鋭工業株式会社 広島支店 殿		機種	OED-1000
客先	1				
環営	1	受取		機番	100383
環品	1				
		受取住所		納入日	平成23年3月31日
		東京都文京区本郷3-12-5			
		点検者	中澤一裕	作業時間	
				受付日	平成26年8月8日
		返送先		出荷日	平成26年9月9日
計	3	東京都文京区本郷3-12-5			

修理依頼・不具合内容

輸送事故 (2014年7月18日 広島⇒東京発送 福山通運 666-0842-4746)


不具合原因 (故障箇所) と処置予定

[1] 損傷状況

アッパパネルの左側が大きく損傷・変形していました。
輸送時などに大きな衝撃を受けたものと考えられます。(別紙写真も参照ください)

写真1: アッパパネル左側 拡大

写真2: アッパパネル タッチパネル部

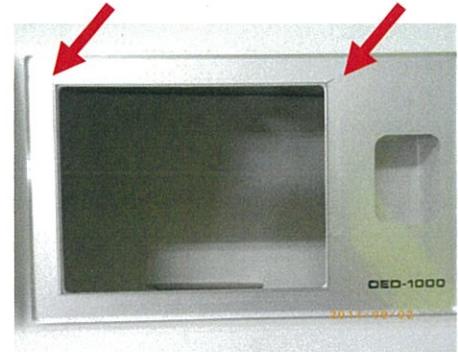

[2] 修理・点検内容

- 1: 部品交換 (下表をご参照ください)
- 2: オゾン水濃度測定 (規定値 0.7 ± 0.2 ppm) : 0.69ppm ・ ・ 正常
- 3: 運転確認 ・ ・ ・ 正常

[3] 装置情報

運転プログラム: Ver0207/T02B

交換後運転回数: 41

消毒: 1684 消毒+アルコール: 782 リークチェック: 344 自己洗浄: 399 アルコール単独: 24 I7単独: 11

承認	安 14.9-4 田
審査	中 26.9-4 澤
作成	
H26.9.4 中澤	

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
	アッパパネルASSY	1式	
	殺菌水槽 COMPL	1式	

写真3：輸送伝票



写真4：交換部品一式



写真5：アッパパネル交換前



写真6：アッパパネル交換後

