

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 1 月 29 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100128
作業年月日	平成 27 年 1 月 27 日		作業時間:	Hr
顧客名	泉崎クリニク様		TEL:	027-221-7888
所在地	群馬県前橋市南町 2-10-10		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 22 年 9 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴
・ タッチパネル 破損 表示不正常 (黒い状態)

不具合原因、作業内容
・ タッチパネルの不具合 (交換)
・ 作動確認、殺菌+7L 1回 殺菌 1回 実施

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バッテリー数 84%
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
・ タッチパネル 作動確認は問題ありません。

装置情報	交換後運転回数: 280	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 2166	殺菌+7L: 2048
	リークチェック: 4/76	自己洗浄: 660	7L単独: 47	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		タッチパネル		☒	1
排水栓		☐				☐	
オゾン水濃度計		☐				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		平成 27 年 1 月 29 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		ご署名 相京 亮 印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 機械事業部
サービスグループ
東京都江東区東雲1-7-12 KDX 豊洲グランスクエア 9 階
TEL: 03-5859-5012

責任技術者	作業者
	小野