

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年6月4日

|       |                                                                             |                                                            |           |                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                         |                                                            | 製造番号:     | 100002                              |
| 作業年月日 | 平成27年6月4日                                                                   |                                                            | 作業時間:     | 1 Hr                                |
| 顧客名   | 札幌支店デモ機 (IH工所有)                                                             |                                                            | TEL:      |                                     |
| 所在地   |                                                                             |                                                            | 担当        | 様                                   |
| 販売店   |                                                                             |                                                            | 担当        | 様                                   |
| 納入年月日 | 平成 年 月 日                                                                    | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品       |                                     |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 |                                                            | 定期点検シール記入 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                 |                                                            | 修理表示貼付    | <input type="checkbox"/>            |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                    |           |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 502    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

ありがとうございました 1000S ver.207 (最新版)

|          |              |          |                  |             |            |
|----------|--------------|----------|------------------|-------------|------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 183 |          | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 殺菌: 453     | 殺菌+7L: 377 |
|          | リークチェック: 157 | 自己洗浄: 68 |                  | アルコール単独: 22 | エア単独: 26   |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称   | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|----------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 洗浄コネクタ   | 02    | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    | アルコールタレフ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    | キャップ     |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |          |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |          |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店  
北海道札幌市東区北6条東5-1-4  
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

